

# Aloclair® PLUS

## Colutorio

Aloclair® Plus Colutorio forma una película protectora que se adhiere a la cavidad oral a modo de barrera mecánica sobre las zonas afectadas, aliviando así el dolor causado por las terminaciones nerviosas expuestas.

Aloclair® Plus Colutorio favorece la cicatrización y contribuye al alivio del dolor causado por pequeñas lesiones en la boca tales como las causadas por estomatitis aftosa, úlceras aftosas y lesiones traumáticas causadas por los dispositivos de ortodoncia y las dentaduras postizas. Indicado también para úlceras aftosas difusas. El ácido hialurónico y el Aloe vera presentes en la formulación estimulan el proceso natural de cicatrización de los tejidos dañados.

**INSTRUCCIONES DE USO:** Llene el vasito dosificador hasta la marca de 10 ml. Enjuáguese la boca durante al menos un minuto y luego expúlselo. Úselo 3-4 veces al día, o según necesidad. Aloclair® Plus Colutorio es inocuo si se ingiere.

**INGREDIENTES:** Agua, polivinilpirrolidona (PVP), maltodextrina, propilenglicol, aloe barbadensis, hidroxietilcelulosa, sorbato potásico, benzoato sódico, PEG-40 aceite de castor hidrogenado, EDTA disódica, cloruro de benzalconio, hialuronato sódico, aroma, sacarina sódica, glicirrizato dipotásico.

**ADVERTENCIAS:** El uso de Aloclair® Plus Colutorio esta contraindicado en pacientes con antecedentes conocidos de hipersensibilidad a alguno de sus ingredientes.

**PRECAUCIONES DE EMPLEO:** No utilizar si el frasco esta abierto o perforado. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura ambiente, alejado de la luz solar directa.

Presentaciones: **60 y 120 ml**

Aloclair® es una marca registrada de Sinclair Pharmaceuticals Limited.

EP 1313489

CE 0477

Rev 07/2008

Fabricante:  
Sinclair Pharma Srl  
Viale Restelli 29  
20124 Milano, Italia

SINCLAIR

ITALFARMACO S.A.

Distribuido en España por:  
Italfarmaco S.A.  
C/ San Rafael, 3  
28108 Alcobendas (Madrid)  
[www.alocclair.es](http://www.alocclair.es)

AA033716/3 211296/03